

# CryoPen<sup>®</sup>



Reinventing Cryosurgery





# CRIOCIRUGÍA DE VANGUARDIA

CryoPen es una gama de innovadores y potentes herramientas de criocirugía, diseñadas para eliminar completamente todas las lesiones cutáneas benignas de forma rápida y rentable. El tratamiento es muy rápido y muy eficaz sin necesitar cuidado posterior.

CryoPen emite un microchorro de nitroso óxido (N<sub>2</sub>O) de alta presión (50-55 bars), logrando en el tejido con una temperatura de -89°C para necrosar el tejido infectado en unos segundos.

## **Sin dolor, sin complicaciones, sin cuidados posteriores**

El tratamiento con CryoPen no causa dolor, sin daño al tejido sano y poco o sin cicatrices. También requiere un mínimo atención posterior al tratamiento.

## **Fácil de usar**

Si no tiene experiencia con criocirugía, todo lo que necesita será su habilidad de diagnóstico y una mano firme. Si tiene experiencia en el uso de herramientas tradicionales de criocirugía, estará encantado con el excepcional rendimiento del CryoPen, con su precisión milimétrica y su facilidad de uso!



# MIRE



EL CRYOPEN EN ACCIÓN

## **Tratar todas las lesiones cutáneas benignas**

Tratar patologías comunes en unos segundos: Acrocordón, queratosis y queilitis actínica, hemangioma capilar, leishmaniasis cutánea, lupus eritematoso discoide, verrugas filiformes, planas, vulgares, plantares y anogenitales, rosácea, liquen escleroso, granuloma anular, molusco contagioso, queratosis seborreica y lesiones víricas.


## **Fácil de usar**

Cada dispositivo CryoPen tiene su propia gama de aplicadores. Se pueden pedir cartuchos adicionales. Los cartuchos tienen una caducidad de 2 años y se conservan en una temperatura ambiente.



# ELIMINACIÓN PERFECTA DE LESIONES DE LA PIEL

CryoPen ofrece resultados excepcionales para la eliminación completa de todas las lesiones cutáneas benignas en una sola sesión de tratamiento.

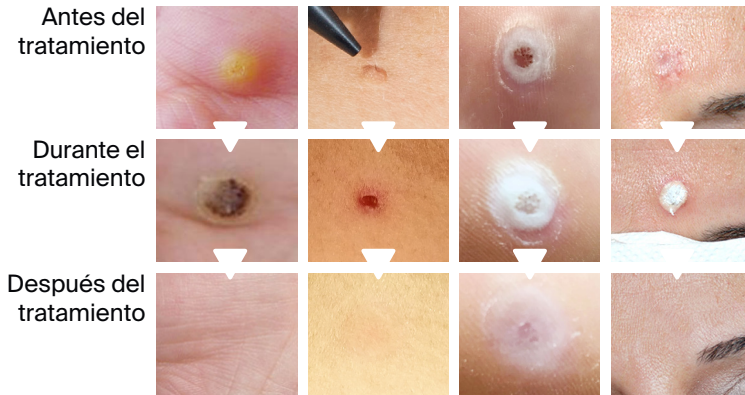


## **Acrocordón**

Tratamiento:  
10-15 seg.




## **Etiqueta de la piel**

Tratamiento:  
5-10 seg.

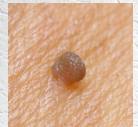

## **Mancha de pigmentación**

Tratamiento:  
3-5 seg.

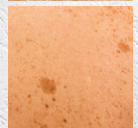

## **Léntigo solar**

Tratamiento:  
3-5 seg.



## **Molusco contagioso**

Tratamiento:  
10-15 seg.



## **Hemangioma**

Tratamiento:  
5-10 seg.



## **Seborreico queratosis**

Tratamiento:  
5-10 seg.



## **Verruga**

Tratamiento:  
10-15 seg.



# ELIGE EL CRYOPEN MÁS APROPIADO

La serie CryoPen incluye una gama de dispositivos, aplicadores y cartuchos de criocirugía similares a bolígrafos para satisfacer las necesidades de cada doctor con su especialidad. Estaremos encantados de aconsejarle.



## CryoPen® M

Para uso menos frecuente.  
Lesiones superficiales.  
Compatible con cartuchos de 8 o 16 gramos.

- Aplicador 1-3mm |
- Aplicador 2-6mm ||

## CryoPen® X+

Para uso intensivo y variado. Compatible con cartuchos de 8 ó de 16 gramos.

- Aplicador 1-3mm |
- Aplicador 2-6mm ||
- Aplicador 4-8mm |||
- Aplicador 7-20mm ||||
- Aplicador largo 1-3mm |
- Aplicador largo 2-6mm ||

## CryoPen® B+

Para uso frecuente o regular. Para lesiones más grandes. Compatible con cartuchos de 23.5 gramos.

- Aplicador 1-4mm |
- Aplicador 2-6mm ||
- Aplicador 4-8mm |||



## Cartuchos

**8g N<sub>2</sub>O**  
1 caja contiene 24 cartuchos.

**16g N<sub>2</sub>O**  
1 caja contiene 6 cartuchos



## CryoPen® o+

Dispositivo multiuso de criocirugía para uso regular. Compatible con cartuchos de 8 y de 16 gramos

- Aplicador 1-3mm |
- Aplicador 2-6mm ||
- Aplicador 4-8mm |||
- Aplicador 7-20mm ||||

## CryoPen® XP

Suitable for intensive and varied use. Available in 2 sizes, for 8g or 16g N2O cartridges.

- Aplicador 1-3mm |
- Aplicador 2-4mm ||
- Aplicador 3-5mm |||
- Aplicador 5-8mm ||||

**23.5g N<sub>2</sub>O**

1 caja contiene 6 cartuchos.

**5**  
AÑOS DE  
GARANTÍA  
2 años en los  
aplicadores



FABRICADO POR



**H&O EQUIPMENTS**

Reinventing Cryosurgery

**USA Office**

115 Fairchild St, Suite 370,  
Charleston, SC 29492  
USA

Phone : +1 888-248-2838  
cryoprobe@ho-equipments.com

Horas de oficina:  
Lunes - Viernes  
9:00-17:00 (GMT -4)

**Head Office**

Rue des Journaliers 1  
7822 Ghislenghien  
Belgium

Phone : +32 68 26 86 00  
info@ho-equipments.com

Horas de oficina:  
Lunes - Viernes  
9:00-17:00 (GMT +2)

[www.ho-equipments.com](http://www.ho-equipments.com)  
[info@ho-equipments.com](mailto:info@ho-equipments.com)

DISTRIBUIDO POR

**AM** AKROMED